

Bard Care

Produktkatalog

BARD

CARE

Care. Comfort. Choice.



Inhalt

	Seite
Silikon	4
Hydrophile Einmalkatheter aus Silikon	
HYDROSIL Go™ Hydrophiler Einmalkatheter – für die Frau	7
HYDROSIL® Rose Hydrophiler Einmalkatheter – für die Frau	8
MAGIC ^{3®} Female Hydrophiler Einmalkatheter – für die Frau	9
MAGIC ^{3®} SURE-GRIP™ Hydrophiler Einmalkatheter – für den Mann	10
MAGIC ^{3®} Pediatric SURE-GRIP™ Hydrophiler Einmalkatheter – für das Kind	11
Kondomurinale aus Silikon mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung	
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung – für den Mann	13
Kondomurinale aus Silikon, selbsthaftend	
ULTRAFLEX™ Selbsthaftende Kondomurinale – für den Mann	15
POP-ON™ Selbsthaftende Kondomurinale – für den Mann	15
WIDEBAND™ Selbsthaftende Kondomurinale – für den Mann	15
Zubehör	
Urin-Sammelsysteme	
PROSYS™ Beinbeutel	17
LAPROCARE™ Bettbeutel	18
BARDIA® Bein- und Bettbeutel	19
Center-Entry Urindrainagebeutel	20
BARD® Urindrainage-Messkammern	21
Inkontinenz-Klemmen	
Cunningham Inkontinenz-Klemme	22
Katheterventile	
FLIP-FLO™ Katheterventil	23
Dauerkatheter	
LUBRI-SIL™ Silikon Foley-Katheter	25
STATLOCK® Foley Stabilisierungssysteme	26
Bestell-Nr. Index	27

Silikon, die Wahl für die Umwelt

BARD® hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Medizinprodukte aus medizinisch zugelassenem Silikon zu entwickeln.

Medizinisch zugelassenes Silikon ist ein erstaunliches Material mit dem einzigartigen Potenzial, unsere Welt zu verbessern, ohne unsere natürlichen Ressourcen in größerem Umfang zu dezimieren. Silikon kann sicher verbrannt oder unbedenklich auf Deponien abgebaut werden, da es schlussendlich wieder, ohne Freisetzung von schädlichen Chemikalien, zu Quarzsand zerfällt, aus dem es hergestellt wurde.

Sicher und komfortabel

Silikone bieten enorme Vorteile gegenüber Kunststoffen auf Erdölbasis. Dank ihres flexiblen „Rückgrats“ können sie geformt und ihre Eigenschaften verbessert oder verändert werden, um einer Vielzahl nützlicher Anwendungen zu entsprechen. Silikone verhärten sich nicht mit der Zeit und reagieren auch nicht mit anderen Materialien, sie unterstützen kein Wachstum von Bakterien und reizen nicht den Körper.

Sie erzeugen weder unwillkommene Nebenprodukte, noch lösen sie allergische Reaktionen aus. Viele vertraute Alltagsgegenstände sind aus Silikonen hergestellt.

Medizinisch zugelassenes Silikon ist das ideale Material für Einmalkatheter und Kondomurinale. Es ist weich und flexibel, um sich der weiblichen und männlichen Anatomie anzupassen.

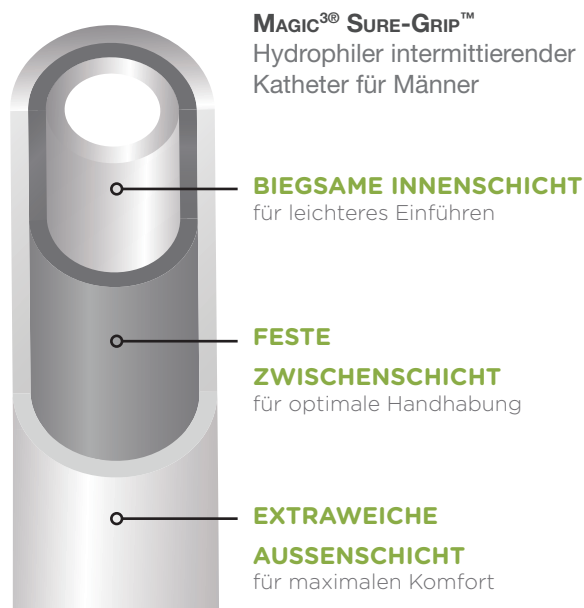


ABBILDUNG 1:
Dreischichtiger Aufbau des MAGIC³ SURE-GRIP™ Katheters

Silikon als effizientes Material für intermittierende Katheter

Das in den Einmalkathetern verwendete Silikon nutzt eine Drei-Schicht-Technologie mit drei speziellen Silikonschichten, die dem Katheter einzigartige Merkmale verleihen: Die extraweiche Außenschicht ist an der kritischen Kontaktfläche zur Harnröhre besonders sanft. Die feste Zwischenschicht sorgt für Stabilität und leichtere Handhabung, ohne die Weichheit der Außenschicht zu verringern. Die biegsame Innenschicht schließlich erleichtert es, den Katheter ohne unnötigen Kraftaufwand durch die Harnröhre zu schieben.

Einer der bedeutendsten Vorteile von Silikon ist sein niedriger Reibungskoeffizient. Labortests, in denen untersucht wurde, welche relative Kraft erforderlich ist, um einen hydrophilen intermittierenden Katheter durch ein dreifach gebogenes Glasröhrchen zu schieben, ergaben eine durchschnittliche Einführkraft von 88 g bei MAGIC³® SURE-GRIP™ gegenüber 254 g bzw. 225 g bei den zwei untersuchten PVC-Kathetertypen.

MAGIC³® SURE-GRIP™ (88 g)

PVC-Katheter A (254 g)

PVC-Katheter B (225 g)

ABBILDUNG 2: Durchschnittliche Einführkraft der drei untersuchten Katheter. Vorliegende präklinische Daten.

Test eines unabhängigen Labors zur Messung der relativen Kraft, die erforderlich ist, um einen hydrophilen intermittierenden Katheter durch ein dreifach gebogenes Glasröhrchen zu schieben.

Eine weitere Eigenschaft, die Silikon als Material für ISK-Katheter besonders interessant macht, ist, dass sich das Silikonmaterial ohne Beschädigen des Katheters falten lässt. Im Rahmen eines Labortests wurden der MAGIC³® SURE-GRIP™, der Wellspect Lofric® Origo™ und der Hollister® Vapro™ nach dem gleichen Verfahren gefaltet und für zwei bzw. sechs Stunden in einen Plastikbeutel gesteckt. Der MAGIC³® SURE-GRIP™ Katheter zeigte sowohl nach zwei als auch nach sechs Stunden eine geringere Verformung als die beiden Vergleichsprodukte. Diese Daten untermauern die Vorteile von Silikonkathetern und dem MAGIC³® SURE-GRIP™ Katheter als effiziente Option für ISK-Patienten.

Silikon als effizientes Material für Kondomurinale

Ihre Körperfeuchte kann durch die Silikonmembran einfach nach außen dringen und hilft, Ihr Kondomurinal sicher am Platz und Ihre Haut in gutem Zustand zu halten.

Die Kondomurinale sind aus einem Stück gefertigt. Die profilierte Abflussöffnung gestattet den Abfluss des Harns, sogar wenn die Spitze verdreht oder unter der Kleidung abgeknickt ist. Die starke, dünne Silikonmembran dehnt sich sanft aus, um sich den Konturen des Penis und den Körperbewegungen anzupassen. Dank des speziell entwickelten adhäsiven Materials haften BARD® Kondomurinale aus Silikon fest am Platz und minimieren so die Gefahr einer Ablösung oder eines Urinabgangs. Die Feuchtigkeit der Hautoberfläche kann langsam durch die Silikonmembran verdunsten, der Zustand der Haut kann durch das klare Silikon kontrolliert werden, ohne das Kondomurinal entfernen zu müssen.¹

Referenzen:

1 Karen Logan, Moderne Kontinenzversorgung 2014, 7-8

Hydrophile Einmalkatheter aus Silikon


Weich. Angenehm. Diskret.

Die einzigen Einmalkatheter aus
reinem Silikon.

Einzigartige CLEANGLIDE™ Beschichtung

CLEANGLIDE™ ist eine einzigartige gleitfähige hydrophile Beschichtung der nächsten Generation. Die hydrophile Beschichtung des Katheters wird beibehalten, der gebrauchsfertige Katheter benötigt keine weitere Aktivierung des Anwenders durch Wasser.

Der HYDROSIL® Katheter mit M³-Technologie ist der erste intermittierende Katheter, der aus drei reinen Silikonschichten gemacht wurde – und erfordert keine Kompromisse.

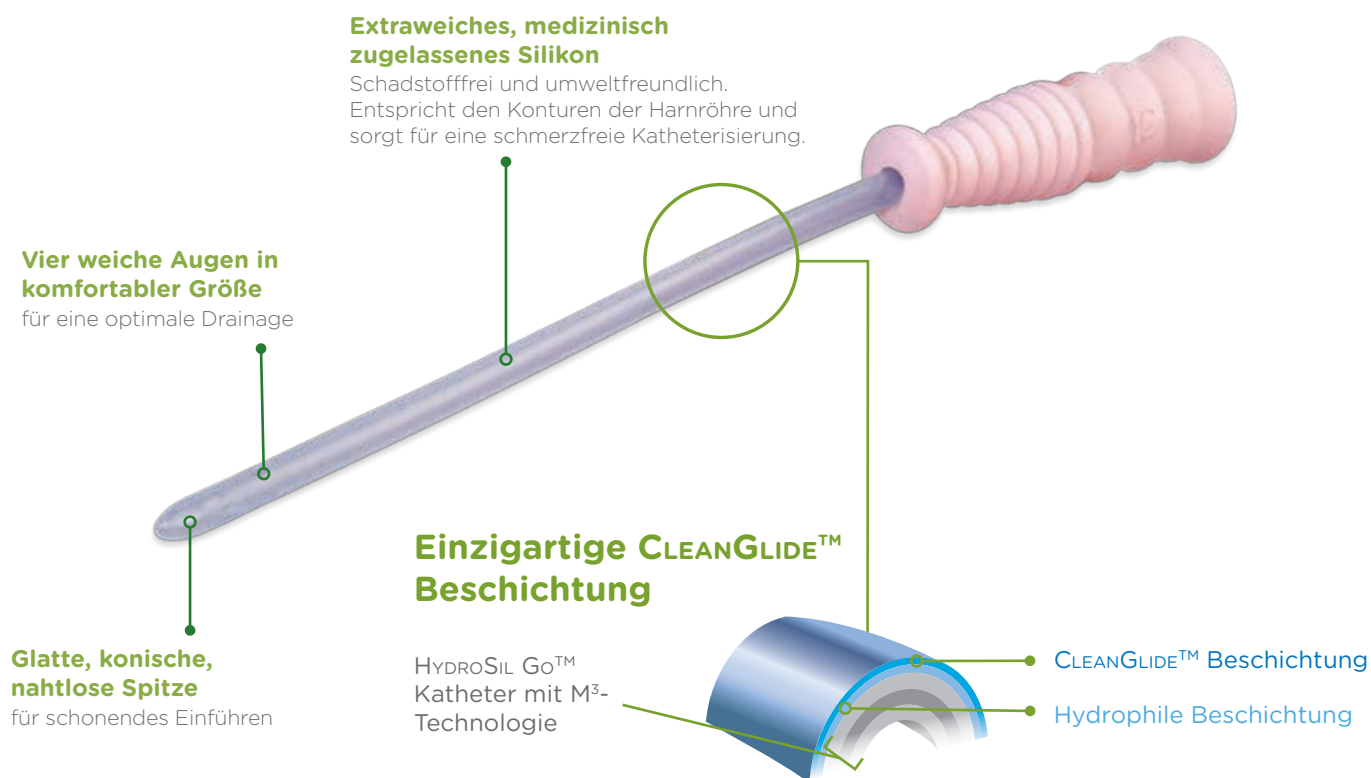

BESTELLINFORMATION

HydroSil Go™ Hydrophiler Einmalkatheter aus Silikon, Länge 10 cm			
▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
10 CH	71810	15.25.14.7077	11668652
12 CH	71812	15.25.14.7077	11668669
14 CH	71814	15.25.14.7077	11668675
16 CH	71816	15.25.14.7077	11668681
18 CH	71818	15.25.14.7077	11668698

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

HydroSil® Rose

HYDROPHILER EINMALKATHETER AUS SILIKON


Katheter mit speziell entwickeltem Griff für mehr Kontrolle

Das einzigartige, hydrophile, medizinisch zugelassene Silikon – weich und flexibel, dabei ausreichend fest und robust – ist ideal für eine komfortable und „reibungslöse“ Katheterisierung und lässt sich diskret transportieren.



M³-Technologie

Der dreilagige Aufbau verbindet eine optimale Handhabung mit komfortablen Trageeigenschaften.

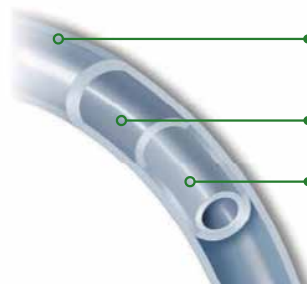

Extraweiche Außenschicht, entwickelt um den Komfort zu maximieren

Feste mittlere Schicht für eine einfache Handhabung

Geschmeidige Innenschicht zum leichten Navigieren

Glatte, konische, nahtlose Spitze
für schonendes Einführen



Vier weiche Augen in komfortabler Größe
für eine optimale Drainage

Reines, steriles Wasser im Sachtet enthalten

Sie müssen sich keine Gedanken über sauberes Wasser machen und haben eine sofortige Anfeuchtung.

BESTELLINFORMATION

HydroSil® Rose Hydrophiler Einmalkatheter aus Silikon, Länge 10 cm

► VE 30 Stück*

Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
10 CH	71410	15.25.14.7073	11096701
12 CH	71412	15.25.14.7073	11096718
14 CH	71414	15.25.14.7073	11096724
16 CH	71416	15.25.14.7073	11096730
18 CH	71418	15.25.14.7073	11096747

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Magic³® Female

HYDROPHILER EINMALKATHETER AUS SILIKON

Der einzige Einmalkatheter aus reinem Silikon für Frauen

MAGIC³® Female besteht aus einem einzigartigen, hydrophilen, medizinisch zugelassenen Silikon, das weich und flexibel, dabei ausreichend fest und robust ist. Somit ist der Katheter ideal für eine komfortable und „reibunglose“ Katheterisierung.

Glatte, konische, nahtlose Spitze

für schonendes Einführen

Extraweiches, medizinisch zugelassenes Silikon

Schadstofffrei und umweltfreundlich. Angepasst an die weibliche Anatomie sorgt er für eine schmerzfreie Katheterisierung.



Reines, steriles Wasser im Sacht enthalten

Sie müssen sich keine Gedanken über sauberes Wasser machen und haben eine sofortige Anfeuchtung.

BESTELLINFORMATION

MAGIC ³ ® Female Hydrophiler Einmalkatheter aus Silikon			
▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
10 CH	51610	15.25.14.7054	11136889
12 CH	51612	15.25.14.7054	11136895
14 CH	51614	15.25.14.7054	11136926
16 CH	51616	15.25.14.7054	11136932
18 CH	51618	15.25.14.7054	11136949

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Magic³® Sure-Grip™

HYDROPHILER EINMALKATHETER AUS SILIKON

Der einzige Einmalkatheter aus reinem Silikon für Männer

MAGIC³® SURE-GRIP™ besteht aus einem einzigartigen, hydrophilen, medizinisch zugelassenen Silikon, das weich und flexibel, dabei ausreichend fest und robust ist. Somit ist der Katheter ideal für eine komfortable und „reibungslöse“ Katheterisierung und lässt sich unbegrenzt oft zusammenfalten und diskret transportieren.

Saubere „No-Touch“-Technik

mit dem SURE-GRIP™ (Greifer) ermöglicht Ihnen mehr Kontrolle, ohne dass Sie die gleitfähige Oberfläche berühren.



Glatte, konische, nahtlose Spitze

für schonendes Einführen



Vier weiche Augen in komfortabler Größe

für eine optimale Drainage

BESTELLINFORMATION

MAGIC ³ ® SURE-GRIP™ Hydrophiler Einmalkatheter aus Silikon			
▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
10 CH	53610G	15.25.14.7054	11136808
12 CH	53612G	15.25.14.7054	11136814
14 CH	53614G	15.25.14.7054	11136820
16 CH	53616G	15.25.14.7054	11136837
18 CH	53618G	15.25.14.7054	11136843

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Magic³® Pediatric Sure-Grip™


PÄDIATRISCHER HYDROPHILER EINMALKATHETER AUS SILIKON

Der einzige Einmalkatheter aus reinem Silikon für Kinder

MAGIC³® Pediatric SURE-GRIP™ zeichnet sich durch besondere Merkmale aus, die eine geschmeidige und bequeme Anwendung ermöglichen. Der Katheter besteht aus medizinisch zugelassenem Silikon, so dass im Hinblick auf Giftstoffe oder die Entsorgung keine Bedenken bestehen. Neben dem positiven optischen Eindruck sorgen die physikalischen Eigenschaften des Silikonmaterials für weniger Schmerzen, als es bei der Verwendung silikonfreier Produkte der Fall ist.

Reines, steriles Wasser

Sie müssen sich keine Gedanken über sauberes Wasser machen und haben eine sofortige Anfeuchtung.

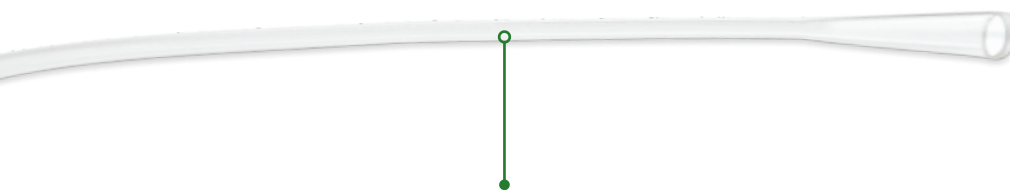

Extraweiches, medizinisch zugelassenes Silikon

Schadstofffrei und umweltfreundlich. Angepasst an die Anatomie sorgt er für eine schmerzfreie Katheterisierung.

BESTELLINFORMATION

MAGIC ³ ® Pediatric SURE-GRIP™ Hydrophiler Einmalkatheter aus Silikon		
▶ VE 30 Stück*		
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**
6 CH	52606G	15.25.14.7054
8 CH	52608G	15.25.14.7054
10 CH	52610G	15.25.14.7054

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

KONDOMURINAL MIT HYDROKOLLOID- HAFTBESCHICHTUNG

Regulierung der Hautfeuchtigkeit

Medizinisch zugelassenes Silikon ist das ideale Material für Kondomurinale.

Trockene Haut ist der Schlüssel für gute Haftung

Die Hydrokolloid-Haftbeschichtung des SPIRIT™ Silikon-Kondomurinals erlaubt die Transpiration durch die Silikonmembrane mit einer bis zu 50 % höheren Durchlässigkeitsrate als vergleichbare Silikon-Kondomurinale.

Optimaler Feuchtigkeitstransport



BESTELLINFORMATION

▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung Style 1			
S (klein) - 25 mm	35301	15.25.04.7029	11023240
M (mittel) - 29 mm	35302	15.25.04.7029	11023263
Zwischengröße - 32 mm	35303	15.25.04.7029	11023292
L (groß) - 36 mm	35304	15.25.04.7029	11023317
XL (extragroß) - 41 mm	35305	15.25.04.7029	11023346
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung-Style 2			
S (klein) - 25 mm	37301	15.25.04.7029	11023369
M (mittel) - 29 mm	37302	15.25.04.7029	11023381
Zwischengröße - 32 mm	37303	15.25.04.7029	11023406
L (groß) - 36 mm	37304	15.25.04.7029	11023429
XL (extragroß) - 41 mm	37305	15.25.04.7029	11023441
SPIRIT™ Kondomurinal mit Hydrokolloid-Haftbeschichtung Style 3			
S (klein) - 25 mm	39301	15.25.04.7029	11023464
M (mittel) - 29 mm	39302	15.25.04.7029	11023501
Zwischengröße - 32 mm	39303	15.25.04.7029	11023530
L (groß) - 36 mm	39304	15.25.04.7029	11023553
XL (extragroß) - 41 mm	39305	15.25.04.7029	11023582


* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

*** Daten bei Rochester Medical vorhanden

Verfügbar in unterschiedlichen Größen und Styles


Die Modell- und Größenauswahl ist entscheidend für die Effizienz und den Tragekomfort.

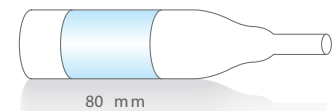

Style 1

Standard-Kondomurinallänge


mit zentral liegender Haftbeschichtung

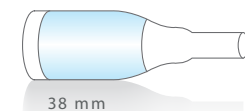

Style 2

Kürzere Kondomurinallänge

mit Haftbeschichtung am distalen Ende. Passend für jede Penisgröße, insbesondere für den retrahierten Penis.

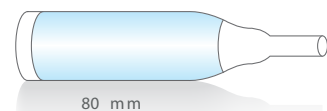

Style 3

Standard-Kondomurinallänge

mit zusätzlicher Haftfläche. Bietet zuverlässigen Schutz für den aktiven Mann. Insbesondere geeignet für Männer, die Schwierigkeiten mit der Haftung herkömmlicher Kondomurinale haben.

KONDOMURINALE AUS SILIKON

Sicher und komfortabel

Das selbsthaftende Kondomurinal
für alle Ansprüche.

UltraFlex™

SELBSTHAFTENDE KONDOMURINALE AUS SILIKON

Verfügbar in unterschiedlichen Größen, damit Sie das Kondomurinal mit dem komfortabelsten und sichersten Sitz auswählen können.

Style 1


Standard-Kondomurinallänge mit zentral liegender Haftbeschichtung

BESTELLINFORMATION

▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
ULTRAFLEX™ Selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 1			
S (klein) - 25 mm	33301	15.25.04.7020	11136398
M (mittel) - 29 mm	33302	15.25.04.7020	11136412
Zwischengröße - 32 mm	33303	15.25.04.7020	11136435
L (groß) - 36 mm	33304	15.25.04.7020	11136458
XL (extragroß) - 41 mm	33305	15.25.04.7020	11136470

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

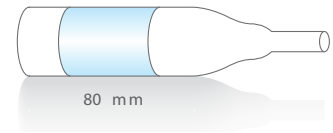

Pop-On™

SELBSTHAFTENDE KONDOMURINALE AUS SILIKON

Verfügbar in unterschiedlichen Größen, damit Sie das Kondomurinal mit dem komfortabelsten und sichersten Sitz auswählen können.

Style 2


Kürzere Kondomurinallänge mit Haftbeschichtung am distalen Ende. Passend für jede Penisgröße, insbesondere für den retrahierten Penis.

BESTELLINFORMATION

▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
POP-ON™ selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 2			
S (klein) - 25 mm	32301	15.25.04.7021	11136636
M (mittel) - 29 mm	32302	15.25.04.7021	11136659
Zwischengröße - 32 mm	32303	15.25.04.7021	11136671
L (groß) - 36 mm	32304	15.25.04.7021	11136694
XL (extragroß) - 41 mm	32305	15.25.04.7021	11136719

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

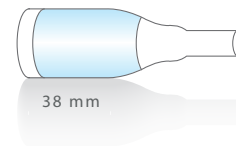

WIDEBand™

SELBSTHAFTENDE KONDOMURINALE AUS SILIKON

Verfügbar in unterschiedlichen Größen, damit Sie das Kondomurinal mit dem komfortabelsten und sichersten Sitz auswählen können.

Style 3


Standard-Kondomurinallänge mit zusätzlicher Haftfläche. Bietet zuverlässigen Schutz für den aktiven Mann. Insbesondere geeignet für Männer, die Schwierigkeiten mit der Haftung herkömmlicher Kondomurinale haben.

BESTELLINFORMATION

▶ VE 30 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
WIDEBAND™ selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 3			
S (klein) - 25 mm	36301	15.25.04.7020	11136493
M (mittel) - 29 mm	36302	15.25.04.7020	11136518
Zwischengröße - 32 mm	36303	15.25.04.7020	11136530
L (groß) - 36 mm	36304	15.25.04.7020	11136553
XL (extragroß) - 41 mm	36305	15.25.04.7020	11136599

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

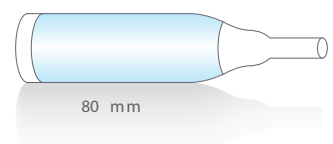

ZUBEHÖR

ProSys™ Beinbeutel

Das Mehr an Komfort

Seit über 100 Jahren entwickelt, produziert und vermarktet die BARD® Medical Division Einweg-Medizinprodukte und Katheter für urologische und Kontinenz-Pflegeanwendungen.



- Ergonomische Beinbeutel mit Mehrkammersystem für geschmeidige Anpassung und mehr Diskretheit
- Vliesbeschichtung für noch mehr Tragekomfort
- Der Verschluss kann einhändig betätigt werden.
- Entwickelt für die optimale Kombination mit BARD® Urinalkondomen und Foley Kathetern
- Der Beinbeutel kann hygienisch mit dem BARD® Bettbeutel gekoppelt werden.
- Verfügbar in 500 ml und 750 ml Beutelgröße mit unterschiedlichen Schlauchlängen
- Sterile und unsterile Beinbeutel verfügbar

BESTELLINFORMATION

ProSys™ Beinbeutel				
Kapazität	Bestell-Nr.	Anschlusschlauchlänge	VE	
500 ml	PFORM500SN	10 cm	10	unsteril
500 ml	PFORM500VN	60 cm	10	unsteril
500 ml	PFORM500LN	30 cm	10	unsteril
750 ml	PFORM750SN	10 cm	10	unsteril
750 ml	PFORM750VN	60 cm	10	unsteril
750 ml	PFORM750LN	30 cm	10	unsteril
500 ml	PFORM500S	10 cm	10	steril
500 ml	PFORM500V	60 cm	10	steril
500 ml	PFORM500L	30 cm	10	steril
750 ml	PFORM750S	10 cm	10	steril
750 ml	PFORM750V	60 cm	10	steril
750 ml	PFORM750L	30 cm	10	steril

LaproCare™ Bettbeutel

Komfortabel. Diskret. Zuverlässig.

Zur Anwendung mit allen Urinal-Kondomen, Beinbeuteln und Kathetern.



- 2000 ml Drainagebeutel, verfügbar als sterile und unsterile Ausführung
- Der Schlauchverschluss kann einfach mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden.
- Ausgestattet mit einem Rückflussventil und einem Probenentnahmeanschluss
- Flexibler und transparenter Schlauch mit 115 cm Länge

BESTELLINFORMATION

LAPROCare™ Bettbeutel				
Kapazität	Bestell-Nr.	Anschlusschlauchlänge	VE	
2000 ml	LN101	115 cm	10	unsteril
2000 ml	LN102	115 cm	10	steril

Bardia® Bein- und Bettbeutel

Für die Anwendung im Krankenhaus entworfen

BARDIA® Beinbeutel

- Konischer Anschluss, nadelfreier Urinproben-Entnahmeport beim mittleren und großen Beutel
- Durch die Längenauswahl des Anschlussschlauches wird dem Patienten das Tragen des Beinbeutels an der Wade oder am Oberschenkel ermöglicht.
Verfügbare Anschlussschlauchlängen: 0 cm | 10 cm | 30 cm
- Die konturierte komfortable und diskrete Form mit mehreren Trageriemern ermöglicht ein sicheres Tragen am Bein durch elastische Baumwoll-/Kletriemen.
- Mit 180° FLIP-FLO™ Katheterventil
- Steril
- Es stehen 3 Größen an Füllvolumen zur Auswahl: 350 ml | 500 ml | 750 ml

BARDIA® Bettbeutel

- Konischer Anschluss, nadelfreier Urinproben-Entnahmeport
- Gesamtkapazität 2000 ml
- Konturierter Innenraum für bessere Drainage
- Kann zur Bildung eines Verbundsystems einfach an den BARD® Beinbeutel angeschlossen werden.
- Mit 180° FLIP-FLO™ Katheterventil
- Steriler, entleerbarer Bettbeutel
- Anschlussschlauchlänge: 98 cm
- Steril



BESTELLINFORMATION

Anschlussschlauchlänge	Kapazität	Beinbeutel ▶ VE 10 Stück* Bettbeutel ▶ VE 50 Stück*		
		Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
BARDIA® Beinbeutel				
0 cm	350 ml	B350S	15.25.05.3079	1854106
30 cm	350 ml	B350L	15.25.05.3079	1854112
0 cm	500 ml	B500S	15.25.05.3079	1854046
10 cm	500 ml	B500M	15.25.05.3079	1854000
30 cm	500 ml	B500L	15.25.05.3079	1854023
0 cm	750 ml	B750S	15.25.05.3079	1853992
10 cm	750 ml	B750M	15.25.05.3079	1853986
30 cm	750 ml	B750L	15.25.05.3079	1853963
BARDIA® Bettbeutel (passend für BARDIA™ Beinbeutel)				
98 cm	2000 ml	B2000	—	—

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Center-Entry

URINDRAINAGEBEUTEL

BARD® Urindrainagebeutel verfügen über eine abgerundete Tropfenform, die eine effiziente Drainage gewährleistet.

Unsere Urindrainagebeutel gibt es in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Kapazitäten.



- Mit CONTROL-FIT™ Ablasshahn
- 2 Haken zur sicheren Fixierung am Bettholm sowie alternativ Kordelfixierung
- 120 cm Anschlusschlauch
- Konischer Anschluss
- Mit Anti-Reflux-Ventil (nur bei Bestell-Nr. 153504)
- Urinproben-Entnahmeport
- Zentrierte Tropfkammer
- Belüftungsventil im Beutel
- Skalierung auf dem Drainagebeutel
- Steril
- In 2 Größen erhältlich

BESTELLINFORMATION

▶ VE 20 Stück*			
Kapazität	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
Center-Entry Urindrainagebeutel - mit Anti-Reflux-Ventil			
2000 ml	153504	15.25.07.0055	7521386
4000 ml	153509	15.25.07.0055	7521392

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Bard® Urindrainage-Messkammern

BARD® Urindrainage-Messkammern werden für eine exakte Messung der Urinproduktion verwendet.

BARD® 200 ml Urindrainage-Messkammer

- Anti-Reflux-Ventil verhindert den Urinrückfluss aus dem Urinauffangbeutel über den Anschlusschlauch.
- Der latexfreie BARD® EZ-LOK® Urinproben-Entnahmeport eliminiert das Risiko von Nadelstichverletzungen und ermöglicht eine nadelfreie Aspiration.
- Gesamtkapazität 2000 ml

BARD® 350 ml Urindrainage-Messkammer

- Der latexfreie BARD® EZ-LOK® Urinproben-Entnahmeport eliminiert das Risiko von Nadelstichverletzungen und ermöglicht eine nadelfreie Aspiration.
- Der SAFETY-FLOW™ Ablasshahn verhindert Urinspritzer beim Entleeren des Auffangbeutels.
- Gesamtkapazität 2500 ml



BESTELLINFORMATION

▶ VE 10 Stück*				
Messkammerkapazität	Gesamtkapazität	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
BARD® 200 ml Urindrainage-Messkammer				
200 ml	2000 ml	153202	–	–
BARD® 350 ml Urindrainage-Messkammer				
350 ml	2500 ml	153204	–	–

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Ein sehr leichter Druck auf die Harnröhre an der Unterseite des Penis verhindert Harnaustritt.



Der erforderliche Druck wird durch die Verdickung im unteren Teil der Cunningham Klemme erreicht. Der obere Teil der Klemme kann für eine gute Passform leicht mit den Fingern in Form gebracht werden.

- Zur wirksamen Kontrolle einer Enuresis (Bettnässen) bei männlichen Patienten aller Altersstufen
- Konstruiert aus Schaumstoff und bequem anpassungsfähig
- In 3 Größen erhältlich: Klein | Mittel | Gross

Die Klemme sollte alle 3 Monate bzw. bei Verschleiß des Schaumstoffs schon früher ersetzt werden.

BESTELLINFORMATION

▶ VE 1 Stück*			
Größe	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
Cunningham Inkontinenz-Klemme - klein (für Knaben)			
1,5 Inch/38 mm	004052	—	7012650
Cunningham Inkontinenz-Klemme - mittel (für Erwachsene)			
2 Inch/51 mm	004053	—	7012667
Cunningham Inkontinenz-Klemme - groß			
3 Inch/76 mm	004054	—	7012673

* einzeln steril verpackt


** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Flip-Flo™ Katheterventil

Das Katheterventil, das den Patienten die Kontrolle überlässt.

Das FLIP-FLO™ Katheterventil eignet sich für eine Vielzahl von Patienten, die entweder Harnröhrenkatheter oder suprapubische Katheter einsetzen. Der frühzeitige Gebrauch des FLIP-FLO™ Katheterventils kann helfen, den Blasentonus und die Blasenkapazität zu erhalten.¹ Die Spülwirkung kann auch das Risiko einer Blockage minimieren.²

- Wird von den Patienten einem Urinbeutel vorgezogen
- Der frühzeitige Gebrauch erhält den Tonus der Blase.
- Unauffällig unter den meisten Kleidungsstücken
- Vielseitig – kann an Nachtdrainagebeutel angeschlossen werden
- Weniger Katheter-assoziierte Probleme, die „Spülwirkung“ kann Infektionen und das Verstopfen des Katheters vermindern.²
- Geeignet für Patienten mit transurethralen oder suprapubischen Kathetern, für den Langzeit- oder Kurzzeitgebrauch

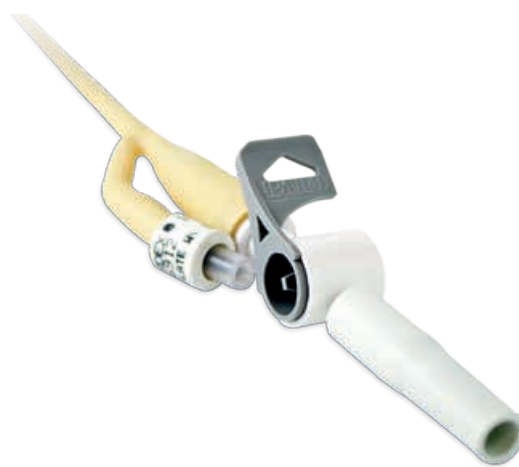

BESTELLINFORMATION

FLIP-FLO™ Katheterventil		
▶ VE 5 Stück*		
Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
BFF5	15.25.16.0026	7012621

FLIP-FLO™ Katheterventil		
▶ VE 20 Stück*		
Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
BFF20	15.25.16.0026	7012638

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Referenzen:

- 1 Fader M et al., Br J Nursing 1997; 6 (7); 359-367
- 2 Addison R., Br J Nursing 1999; 8 (9); 567-580 mild bis schwer


DAUERKATHETER

Komfort. Diskretion. Effizienz.

Der Silikon-Katheter
mit dem Unterschied.

Der Silikon-Katheter mit dem Unterschied.

Der BARD® LUBRI-SIL™ Foley-Katheter ist ein 100% latex-freier Silikonkatheter. Die Hydrogel-Beschichtung erzeugt ein „Gelkissen“ zwischen der Katheteroberfläche und dem empfindlichen Harnröhrengewebe, das die Reibung reduziert und den Patientkomfort verbessert.

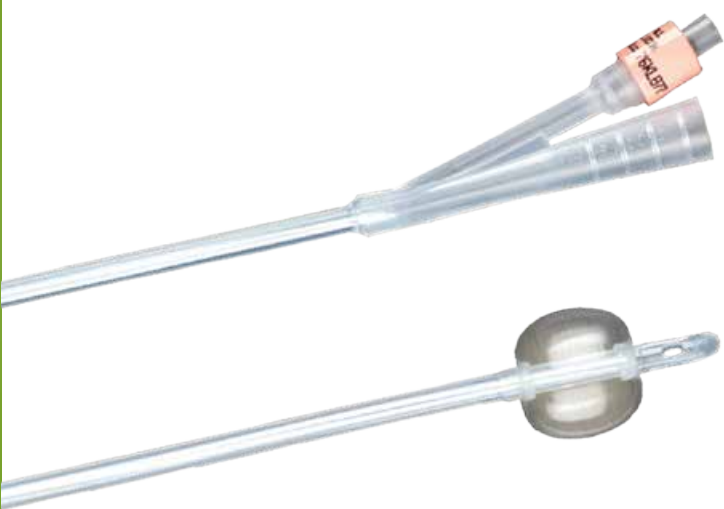

- Hydrogel-Beschichtung für mehr Komfort
- 100% latex-frei
- Resistent gegen bakterielle Kolonisierung und Verkrustung¹
- Indiziert für suprapubische oder transurethrale Anwendung
- Ermöglicht einfaches und angenehmes Platzieren für die Patienten
- Die hydrophile Oberfläche wirkt wie ein Rundum-Gelkissen - reduziert die Reibung für einen dauerhaften Komfort¹
- Hydrogel vermeidet die Ansiedlung von Bakterien¹
- Verhindert Verkrustung¹ und verlängert die Haltbarkeit des Katheters

BESTELLINFORMATION


LUBRI-SIL™ Silikon Foley-Katheter - 2 Wege						
▶ VE 10 Stück*						
Ø	Länge	Ballonkapazität	Modell	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
12 CH	43 cm	10 ml	Standard	175812E	15.25.15.6145	6901419
14 CH	43 cm	10 ml	Standard	175814E	15.25.15.6145	6901425
16 CH	43 cm	10 ml	Standard	175816E	15.25.15.6145	6901431
18 CH	43 cm	10 ml	Standard	175818E	15.25.15.6145	6901448
20 CH	43 cm	10 ml	Standard	175820E	15.25.15.6145	6901454
22 CH	43 cm	10 ml	Standard	175822E	15.25.15.6145	6901460
16 CH	43 cm	30 ml	Standard	176816E	15.25.15.6145	6901514
18 CH	43 cm	30 ml	Standard	176818E	15.25.15.6145	6901520
20 CH	43 cm	30 ml	Standard	176820E	15.25.15.6145	6901537
22 CH	43 cm	30 ml	Standard	176822E	15.25.15.6145	6901543
12 CH	26 cm	10 ml	Frauen	176112E	15.25.15.6145	6901572
14 CH	26 cm	10 ml	Frauen	176114E	15.25.15.6145	6901589
16 CH	26 cm	10 ml	Frauen	176116E	15.25.15.6145	6901595
8 CH	30 cm	5 ml	Kinder	175808E	15.25.15.6145	6901394
10 CH	30 cm	5 ml	Kinder	175810E	15.25.15.6145	6901402

* einzeln steril verpackt

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Referenzen: 1 Pomfret I. Br J Com Nursing 2000; 5(1):6-13

Zur „klebeband-freien“ Stabilisierung von Foleykathetern.

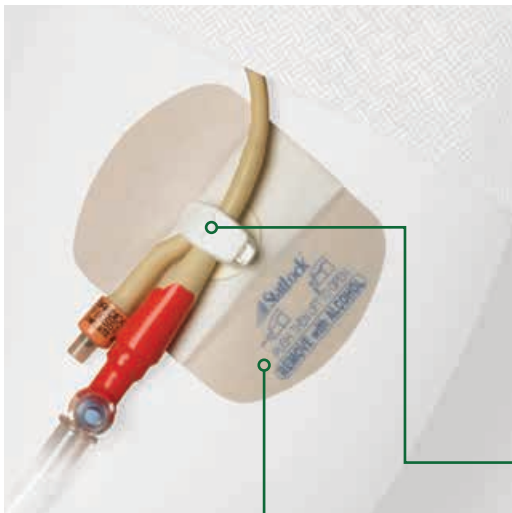

Erfüllt die Richtlinie der CDC zur Fixierung von Foleykathetern.¹

Entwickelt zur:

- Verminderung des Verrutschens von Foleykathetern
- Minimierung unbeabsichtigter Dislokationen des Katheters
- Maximierung des Patientenkomforts durch:
 - Beseitigung der Notwendigkeit umlaufender Haltebänder und des dadurch verursachten Drucks
 - Verminderung von Zugkräften auf den Blasen-katheter

1 Halterung

- Das fest verschließbare Design stabilisiert den Katheter und vermeidet so kolbenartige Bewegungen und zufällige Dislokationen.
- Die drehbare Halterung erlaubt Bewegungen des Katheters mit dem Patienten, ohne dass auf den Katheter Zugkräfte einwirken.
- Ablösbarkeit ermöglicht einfaches Waschen des Patienten.
- Passend für Latexkatheter mit 8-22 F und für Silikonkatheter mit 8-26 F für optimale Vielseitigkeit.

2 Verankerungskissen

- Erhältlich in Größen für pädiatrische und erwachsene Patienten und damit optimale Vielseitigkeit für die effektive Stabilisierung eines Foleykatheters.
- Einfacher anwendbar als Klebebander und umlaufende Haltebänder.
- Mit speziellem alkohollöslichem und damit hautschonendem Haftmittel.
- Erhältlich auch in atmungsaktivem latexfreiem Trikotstoff für mehr Patientenkomfort.

BESTELLINFORMATION

STATLOCK® Foley Stabilisierungssystem	
▶ VE 25 Stück*	
Bestell-Nr.	Beschreibung
FOL0100CE	System für Silikonkatheter mit Verankerungskissen aus Schaumstoff mit Öffnungen zur Hautatmung
FOL0101CE	System für Latexkatheter mit Verankerungskissen aus Schaumstoff mit Öffnungen zur Hautatmung
FOL0102CE	System für Silikonkatheter mit Verankerungskissen aus Trikotstoff

* einzeln steril verpackt

Referenzen:

- 1 Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections. 2009

Bestell-Nr. Index

Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.	PZN	Seite	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.	PZN	Seite
004052	—	7012650	22	175808E	15.25.15.6145	6901394	25
004053	—	7012667	22	175810E	15.25.15.6145	6901402	25
004054	—	7012673	22	175812E	15.25.15.6145	6901419	25
32301	15.25.04.7021	11136636	15	175814E	15.25.15.6145	6901425	25
32302	15.25.04.7021	11136659	15	175816E	15.25.15.6145	6901431	25
32303	15.25.04.7021	11136671	15	175818E	15.25.15.6145	6901448	25
32304	15.25.04.7021	11136694	15	175820E	15.25.15.6145	6901454	25
32305	15.25.04.7021	11136719	15	175822E	15.25.15.6145	6901460	25
33301	15.25.04.7020	11136398	15	176112E	15.25.15.6145	6901572	25
33302	15.25.04.7020	11136412	15	176114E	15.25.15.6145	6901589	25
33303	15.25.04.7020	11136435	15	176116E	15.25.15.6145	6901595	25
33304	15.25.04.7020	11136458	15	176816E	15.25.15.6145	6901514	25
33305	15.25.04.7020	11136470	15	176818E	15.25.15.6145	6901520	25
35301	15.25.04.7029	11023240	13	176820E	15.25.15.6145	6901537	25
35302	15.25.04.7029	11023263	13	176822E	15.25.15.6145	6901543	25
35303	15.25.04.7029	11023292	13	52606G	15.25.14.7054	—	11
35304	15.25.04.7029	11023317	13	52608G	15.25.14.7054	—	11
35305	15.25.04.7029	11023346	13	52610G	15.25.14.7054	—	11
36301	15.25.04.7020	11136493	15	53610G	15.25.14.7054	11136808	10
36302	15.25.04.7020	11136518	15	53612G	15.25.14.7054	11136814	10
36303	15.25.04.7020	11136530	15	53614G	15.25.14.7054	11136820	10
36304	15.25.04.7020	11136553	15	53616G	15.25.14.7054	11136837	10
36305	15.25.04.7020	11136599	15	53618G	15.25.14.7054	11136843	10
37301	15.25.04.7029	11023369	13	B2000	—	—	19
37302	15.25.04.7029	11023381	13	B350L	15.25.05.3079	1854112	19
37303	15.25.04.7029	11023406	13	B350S	15.25.05.3079	1854106	19
37304	15.25.04.7029	11023429	13	B500L	15.25.05.3079	1854023	19
37305	15.25.04.7029	11023441	13	B500M	15.25.05.3079	1854000	19
39301	15.25.04.7029	11023464	13	B500S	15.25.05.3079	1854046	19
39302	15.25.04.7029	11023501	13	B750L	15.25.05.3079	1853963	19
39303	15.25.04.7029	11023530	13	B750M	15.25.05.3079	1853986	19
39304	15.25.04.7029	11023553	13	B750S	15.25.05.3079	1853992	10
39305	15.25.04.7029	11023582	13	BFF20	15.25.16.0026	7012638	23
51610	15.25.14.7054	11136889	9	BFF5	15.25.16.0026	7012621	23
51612	15.25.14.7054	11136895	9	FOL0100CE	—	—	26
51614	15.25.14.7054	11136926	9	FOL0101CE	—	—	26
51616	15.25.14.7054	11136929	9	FOL0102CE	—	—	26
51618	15.25.14.7054	11136949	9	LN101	—	—	18
71410	15.25.14.7073	11096701	8	LN102	—	—	18
71412	15.25.14.7073	11096718	8	PFORM500L	—	—	17
71414	15.25.14.7073	11096724	8	PFORM500LN	—	—	17
71416	15.25.14.7073	11096730	8	PFORM500S	—	—	17
71418	15.25.14.7073	11096747	8	PFORM500SN	—	—	17
71810	15.25.14.7077	11668652	7	PFORM500V	—	—	17
71812	15.25.14.7077	11668669	7	PFORM500VN	—	—	17
71814	15.25.14.7077	11668675	7	PFORM750L	—	—	17
71816	15.25.14.7077	11668681	7	PFORM750LN	—	—	17
71818	15.25.14.7077	11668698	7	PFORM750S	—	—	17
153202	—	—	21	PFORM750SN	—	—	17
153204	—	—	21	PFORM750V	—	—	17
153504	15.25.07.0055	7521386	20	PFORM750VN	—	—	17
153509	15.25.07.0055	7521392	20				

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe • www.bard.de

BARD CARE KUNDENSERVICE

bardcare.de@crbard.com • Hotline: +49 721 9445-800 • FAX: +49 721 9445-801

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene

Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien

TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich

TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

www.bardcare.de

Care. Comfort. Choice.

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard, Bardia, CleanGlide, Control-Fit, EZ-Lok, Flip-Flo, HydroSil, HydroSil Go, LaproCare, LubriSil, Magic3, Pop-On, ProSys, Safety-Flow, Spirit, StatLock, Sure-Grip, UltraFlex und WIDEBands sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers. Copyright © 2016 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CAT001HC-D (04/2016) DACH